



Instrukcja obsługi
Aspirator do nosa dla niemowląt i dzieci
MesMed MM-111 A-psik !

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki. Życzymy przyjemnego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi.

**Aspirator do nosa dla niemowląt i dzieci
MesMed MM-111 A-psik !**

- przyjazny dziecku
- higieniczny , łatwy i wygodny w obsłudze
- zestaw zawiera : zbiorniczek, przewód, ustnik
- bezpieczny : nie zawiera BPA
- instrukcja obsługi w języku polskim -
- praktyczne plastikowe etui
- posiada certyfikat CE, poddany został procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta
- -zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny



Czyszczenie

- 1) Umyj wszystkie akcesoria za pomocą ciepłej wody oraz odrobiną detergentu lub mydła po każdym użyciu
- 2) Pozwól akcesoriom samoczynnie wyschnąć. Kiedy wszystko jest już zupełnie suche-skompletuj z powrotem akcesoria i odłóż do etui

Ogólne uwagi:

- Nie należy sterylizować, gotować akcesoriów
- Należy delikatnie umieszczać końcówkę do nosa w kanale nosowym nie za głęboko
- Nie należy używać aspiratora w przypadku rany, infekcji lub krwawienia z nosa
- Jeśli wydzielina z nosa jest zbyt gęsta, należy wkropić do nosa niewielką ilość soli fizjologicznej

Obsługa

- 1) Ułóż dziecko na kolanach
- 2) Delikatnie umieść końcówkę do nosa w otworze nosowy dziecka. Przyłóż usta do ustnik
- 3) Należy wciągnąć powietrze przez ustnik . W razie konieczności należy powtórzyć czynność.



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.

Wyrób medyczny klasy I

Mescomp Technologies S.A.

Al. Jerozolimskie 47

00-697 Warszawa

Tel. +48 (22) 636 20 00 Fax.+48 (22) 290 32 20

www.mescomp.pl www.mesmed.pl



Biuro serwisu : 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47

E-mail: mescomptel@mescomp.pl

tel. +48 (22) 838 63 38

czynne w godz. 7.30 -15.30