



Instrukcja obsługi

Elektryczny aspirator do nosa

MM-127 HappiNosek

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki. Życzymy przyjemnego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi.

Spis treści

1. Właściwości i najważniejsze funkcje	3
2. Przeczytaj, zanim włączysz urządzenie.....	3
3. Środki ostrożności	4
4. Specyfikacja techniczna	4
5. Opis urządzenia	5
6. Obsługa urządzenia	5
7. Rozpoczęcie pracy urządzenia	6
8. Czyszczenie	7
9. Rozwiązywanie prostych problemów.....	7
10. Znormalizowane oznaczenia	7
1. Deklaracja EMC	8

1. Właściwości i najważniejsze funkcje

Urządzenie służy do higienicznego, szybkiego i efektywnego usuwania zalegającej w nosie wydzieliny u noworodków, niemowląt i małych dzieci, jak również u osób niepełnosprawnych. Dzięki swojej konstrukcji zbiorniczki na wydzielinę można zdjąć i umyć, bez konieczności stosowania kosztownych jednorazowych elementów.

Urządzenie zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych.

Jego kształt oraz higieniczna silikonowa nakładka chroni błonę śluzową nosa, zapobiegając jej uszkodzeniu nawet, gdy dziecko wykona nagły ruch. Aspirator przynosi szybką ulgę i poprawę samopoczucia.

- łagodne i szybkie usuwanie wydzieliny z nosa (2-3 sekundy)
- przeznaczony dla niemowląt, dzieci oraz osób niepełnosprawnych
- 9 poziomów siły ssania
- lampka nocna
- funkcja muzyczna
- wbudowany akumulator - ładowanie przez kabel USB
- łatwy i wygodny w obsłudze
- bezpieczny: specjalnie wyprofilowana miękka silikonowa końcówka
- bogate wyposażenie: panel sterujący, pojemniczek na wydzielinę, 2 silikonowe końcówki, 2 zapasowe silikonowe uszczelki, przewód łączący panel z pojemnikiem, instrukcja

obsługi

- higieniczny: łatwy w czyszczeniu, konstrukcja eliminująca ryzyko przeniesienia infekcji
- posiada certyfikat CE

UWAGA:

MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i oprogramowaniu wynikających z postępu technologicznego.

2. Przeczytaj, zanim włączysz urządzenie


- Aspiratora do nosa dla dzieci należy używać wyłącznie do łagodzenia zatkanego nosa. Nie należy używać urządzenia do uszu lub gardła.
- Gdy nagromadzona objętość wydzieliny przekroczy bezpieczną pojemność pojemniczka (linia max) należy wyczyścić urządzenie.
- Przed i po użyciu urządzenia należy wyczyścić pojemniczek oraz dokładnie go osuszyć. (Rozdział 8.Czyszczenie).
- Nie należy wkładać silikonowej końcówki zbyt głęboko do nosa.
- W przypadku podrażnienia nosa lub krwotoku należy zakończyć oczyszczanie nosa. W takiej sytuacji zalecany jest kontakt z lekarzem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku osobistego.
- Gdy moc ssania słabnie podczas użytkowania, należy naładować akumulator.
- Nie należy korzystać z urządzenia dłużej niż kilka sekund.
- Należy upewnić się, że wszystkie akcesoria są zainstalowane.
- Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies S.A.)


- Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje **utratę gwarancji**.


UWAGA:


Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi.


3. Środki ostrożności


 **Ostrzeżenie. Urządzenie nie jest zabawką.** Należy przechowywać urządzenie z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych elementów.

 Do ładowania urządzenia należy używać zasilacza 5V. Napięcie powyżej 5 V nie może naładować urządzenia.

 Nie używaj aspiratora do nosa podczas ładowania .


 Żadna modyfikacja tego urządzenia nie jest dozwolona. Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia bez przestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje **utratę gwarancji**.

 Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli dowolna z jego części jest uszkodzona oraz jeśli urządzenie wpadło lub było zanurzone w wodzie podczas ładowania. Niezwłocznie należy odesłać urządzenie do centrum serwisowego celem jego sprawdzenia i naprawy.

 Nie narażać na działanie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w miejscach zapyłonych, zabrudzonych.

Nie zanurzać CAŁEGO urządzenia w cieczach.

 Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu substancji łatwopalnych: gazu, tlenu lub aerozolu.

4. Specyfikacja techniczna

Model:	Elektryczny aspirator do nosa MM-127 HappiNosek (BC027)
Maksymalna moc ssania:	70kPa
Napięcie wejściowe:	5V--1A
Napięcie znamionowe:	5V
Poziom hałasu:	< 65dB
Typ ładowania:	USB-C
Pojemność akumulatora:	2500 mA


Wypożyczenie:

panel sterujący, pojemnik na wydzielinę, 2 silikonowe końcówki do nosa, zapasowe uszczelki, przewód, kabel do ładowania, instrukcja obsługi

Wymiary produktu:

130 x 90 x 50 mm

5. Opis urządzenia

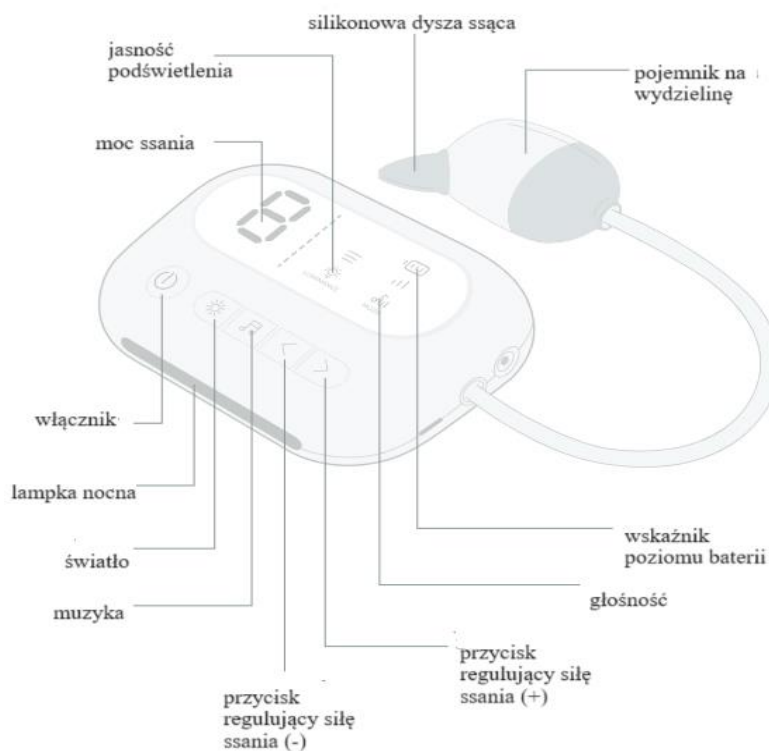

6. Obsługa urządzenia

Przycisk zasilania



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Krótkie przyciśnięcie włącznika powoduje pauzę. Po włączeniu urządzenia, domyślny bieg ssania zostanie ustawiony na poziomie 3, a muzyka i lampka nocna pozostaną domyślnie wyłączone.

Lampka nocna




Naciśnij krótko przycisk oświetlenia, aby włączyć lampkę nocną na pierwszym poziomie jasności. Naciśnij przycisk ponownie, aby zwiększyć jasność. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie jasności na maksymalnym 3 poziomie.

Gdy urządzenie jest włączone/wyłączone lub w trakcie przerwy, naciśnij przez 2 sekundy przycisk podświetlenia, aby wyłączyć lampkę.

Funkcja muzyczna



Naciśnij krótko przycisk muzyki, aby włączyć przyjemną melodię. Są 3 poziomy głośności melodii. Każde naciśnięcie przycisku  zwiększa poziom głośności.

Gdy urządzenie jest włączone lub w trakcie przerwy, naciśnij przycisk muzyki, aby je wyłączyć.

Poziom siły ssania



Aspirator posiada 9 poziomów. Naciśnij krótko przycisk <lub>, aby zmniejszyć lub zwiększyć poziom ssania.

Wskaźnik poziomu baterii



Ikona wskaźnika poziomu naładowania baterii będzie migać, gdy poziom naładowania będzie niski. Podczas ładowania urządzenia ikona będzie migać wolniej, a po pełnym naładowaniu wskaźnik pozostanie włączony.

7. Rozpoczęcie pracy urządzenia

Uwaga: Aby zmiękczyć nagromadzony śluz wpuść kilka kropel roztworu soli fizjologicznej. Oczekaj od 30 sekund do 1 minuty, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

1. Delikatnie włożyć silikonową końcówkę do nosa. Nie wkładaj jej zbyt głęboko.
2. Aby oczyścić nos nacisnąć włącznik przez 2 sekundy i ustawić odpowiedni poziom siły ssania. Aby zakończyć pracę urządzenia nacisnąć przycisk zasilania przez 2 sekundy.
3. Po oczyszczeniu nosa wyczyścić pojemnik. Nie należy korzystać z urządzenia, gdy przekroczony jest wyznaczony poziom (linii max).
4. Przy czyszczeniu pojemnika postępować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 8. Czyszczenie.

8. Czyszczenie

1. Rozłącz pojemnik od przewodu łączącego go z panelem sterującym.
2. Zdejmij silikonową końcówkę.
3. Rozłącz pojemnik, delikatnie pociągając jego części w odwrotnych kierunkach.
4. Umyj części (pojemnik, silikonową końcówkę) w ciepłej wodzie (można użyć środka myjącego) następnie wypłucz w ciepłej wodzie.
5. Pozostaw części do wyschnięcia lub wytrzyj do sucha ręcznikiem/ściereczką.

9. Rozwiązywanie prostych problemów

Nie można włączyć urządzenia

Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany.






Brak ssania


Sprawdzić uszczelkę – czy jest dobrze umiejscowiona, nie jest zużyta.

Sprawdzić szczelność uszczelki.

Sprawdzić, czy silikonowa końcówka znajduje się na właściwym miejscu.

10. Znormalizowane oznaczenia

	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi
	Nie wrzucaj niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi
	Chroń przed wilgocią
	Wyrób zgodny z normą europejską
	Nr partii

	Data produkcji
RoHS	Produkt zgodny z dyrektywą UE o zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych



Mescomp Technologies S.A.

Ul. Meksykańska 6/102

03-948 Warszawa

Tel. +48 (22) 636 20 00 Fax.+48 (22) 290 32 20

<http://mescomp.pl>

Biuro serwisu:

Ul. Meksykańska 6/102

03-948 Warszawa

e-mail: mescomptel@mescomp.pl

tel. +48 (22) 838 63 38

czynne w godz.7.30 -15.30

11.Deklaracja EMC

Urządzenie spełnia wymogi deklaracji EMC, zgodnie z dyrektywą: 2014/30/EU. Urządzenie spełnia wymogi europejskiej normy EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, które określają poziomy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i maksymalne poziomy emisji elektromagnetycznej.

Ostrzeżenie:

Należy unikać włączania sprzętu w pobliżu lub z innymi sprzętami, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, pilnujemy sprzętu w celu sprawdzenia, czy działa normalnie. Użycie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego urządzenia może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznej lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej tego sprzętu i spowodować nieprawidłowe działanie.

Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien być używany bliżej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek części sprzętu, w tym kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego sprzętu.